

2020-09-10 Bruksanvisning förkläde på rulle, Invite Europe

Engångsförkläde

Förkläde för engångsbruk

Teknisk information

Material: polyetenfilm, vätskeavvisande
Provad enligt SS EN 14605:2005+A1:2009

Avsedd användning

Engångsförkläde för att skydda användarens klädsel mot stänk och fläckar och för att minska smittspridning mellan patienter.

Förpackning, förvaring och hantering

Produkten skall hanteras varsamt innan användning.
Förvaring skall ske torrt och svalt.
Produkten skall förvaras på rullen från leverantören tills de används.

Instruktion användning

En storlek passar alla
Dra försiktigt loss förklädet från rullen
Nackbandet träs över huvudet
Bandet i midjan knyts baktill i midjehöjd
Produkten är avsedd för engångsanvändning
Efter användandet kasseras förklädet enligt ordinarie rutin för kassation av engångsprodukter.

Får endast användas av hälso -och sjukvårdspersonal i Sverige. Får inte säljas vidare



Invite Europe AB / Office: +46 156 168 61
Post: Box 143, 619 23 TROSA
Lev: Industrigatan 25, 619 33 TROSA
www.inviteeurope.com



Denna bruksanvisning ska göras tillgänglig för varje användare. Den personliga skyddsutrustningen har ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket att få tillhandahållas under Covid-19 pandemin, trots att det saknar CE-märkning. Skyddsutrustningen får inte användas efter den 31 december 2020.

Plastförkläden på rulle finns i följande utförande:

Produkt	Färg	Vikt/produkt	Dimension
PE APRON ON ROLL	Klar	9.5±0.5	69*117cm
PE APRON ON ROLL	Vit	8.1±0.5	69*107cm
PE APRON ON ROLL	Vit	19.5±0.5	70*130cm
PE APRON ON ROLL	Vit	5±0.5	70*102cm
PE APRON ON ROLL	Vit	6.8±0.5	69*107cm*13um



Invite Europe AB / Office: +46 156 168 61

Post: Box 143, 619 23 TROSA

Lev: Industrigatan 25, 619 33 TROSA

www.inviteeurope.com