

2020-09-10 Bruksanvisning skyddsrock, Invite Europe

Skyddsrock för engångsbruk

Teknisk information

Material: Polypropen belagd med polyeten (PP+PE)
Ultraljudssvetsade sömmar, muddar i latexfritt material
Vikt: 30 alt 45 gsm \pm 2 g, ytvikt
Provad enligt SS EN 14605:2005+A1:2009

Avsedd användning

Skyddsrocken är avsedd för engångsbruk.
Skyddar användaren mot droppsmitta i kontakt med patienter.
Kan även skydda mot smittspridning mellan vårdgivare och patienter.

Förpackning, förvaring och hantering

10 produkter/ förpackning
Produkten skall hanteras varsamt innan användning.
Förvaring skall ske torrt och svalt.
Produkten skall förvaras i emballaget från leverantören tills de används.

Instruktion användning

En storlek passar alla
Rocken träs på framifrån och knyts i nacken
Skärpet knyts i midjehöjd.
Produkten är avsedd för engångsanvändning
Efter användandet kasseras rocken enligt ordinarie rutin för kassation av engångsprodukter.
Får endast användas av hälso -och sjukvårdspersonal i Sverige.

Får inte säljas vidare



Invite Europe AB / Office: +46 156 168 61
Post: Box 143, 619 23 TROSA
Lev: Industrigatan 25, 619 33 TROSA
www.inviteeurope.com

Den här bruksanvisningen ska göras tillgänglig för varje användare. Den personliga skyddsutrustningen har ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket att få tillhandahållas under Covid-19 pandemin, trots att det saknar CE-märkning. Skyddsutrustningen får inte användas efter den 31 december 2020.

